

Informace: Návod k použití

Mastermixy / Chlorid hořečnatý pro HISTO SPOT® SSO soupravy

Testovací soupravy pro tkáňovou typizaci HLA alel na molekulárně genetické úrovni

IVD

CE 0123

- REF 726080: HISTO SPOT® Mastermix A** (pro HISTO SPOT® A 4D, **REF 726010**)
- REF 726081: HISTO SPOT® Mastermix B** (pro HISTO SPOT® B 4D, **REF 726020**)
- REF 726083: HISTO SPOT® Mastermix C** (pro HISTO SPOT® C 4D, **REF 726030**)
- REF 726084: HISTO SPOT® Mastermix DRB1** (pro HISTO SPOT® DRB1 4D, **REF 726040**)
- REF 726204: HISTO SPOT® Mastermix DRB3/4/5** (pro HISTO SPOT® DRB3/4/5, **REF 726045**)
- REF 726082: HISTO SPOT® Mastermix DQ** (pro HISTO SPOT® DQB1 4D/ DQA1, **REF 726051**)
- REF 726086: HISTO SPOT® Mastermix DPB1** (pro HISTO SPOT® DPB1, **REF 726060, 726061**)
- REF 726205: HISTO SPOT® Mastermix DP** (pro HISTO SPOT® DPA1 / DPB1, **REF 726062, 726063**)
- REF 726203: HISTO SPOT® Mastermix Coeliac Disease** (pro HISTO SPOT® Coeliac Disease, **REF 726071**)
- REF 726087: HISTO SPOT® Magnesium Chloride** (pro všechny HISTO SPOT testovací soupravy)

Mastermix I X 1100 µl Mastermixu, připraven k použití, obsahuje biotinylované primery pro vybraný lokus, dNTPs, Taq polymeráza, reakční pufr, 0,05% azidu sodného

MgCl2 Chlorid hořečnatý, 6 mM, připraven k použití, obsahuje 0,001 % ProClin® 300

X = A, B, C, DRB1, DRB3/4/5, DQB1, DQ, DPB1, **DP** nebo Coeliac

Mastermixy a chlorid hořečnatý jsou určeny pro použití se soupravami HISTO SPOT® SSO. Musí být také dodržen pracovní postup uvedený v návodu k použití pro soupravy HISTO SPOT® SSO. Návod k použití pro soupravy HISTO SPOT® SSO se nachází v každé soupravě na CD nebo si ho můžete stáhnout z <http://www.bag-healthcare.com/en/Diagnostika/Downloads/>

SKLADOVÁNÍ

Chlorid hořečnatý a mastermixy by měly být skladovány při teplotě 2...8°C. Doba použitelnosti je uvedena na etiketách jednotlivých reagentů a je platná pouze pro originálně zabalené reagenty. Po otevření spotřebujte do 3 měsíců při dodržení skladovacích podmínek.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ







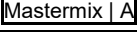
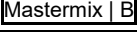
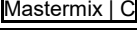
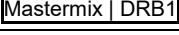
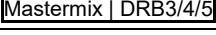
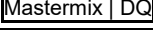
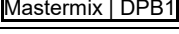

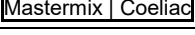

HISTO SPOT® je určen pro použití in vitro a měl by být používán pouze proškolenými a kvalifikovanými pracovníky. Roztok chloridu hořečnatého obsahuje jako konzervační činidlo ProClin®300 v koncentraci 0,001%. Mastermixy obsahují jako konzervační činidlo azid sodný. Reagenty obsahují < 0,1% azidu sodného a tato koncentrace není považována za škodlivou. Přesto se vyhněte styku s kůží a sliznicemi. Azid sodný může reagovat s olověným a měděným potrubím za vzniku výbušných azidů kovů. Při likvidaci roztoků obsahujících azid sodný v laboratořích vyplachujte potrubí dostatečným množstvím vody tak, aby nedošlo k nahromadění azidů.

Veškerá práce s výše uvedenými činidly by měla být prováděna za dodržování příslušných bezpečnostních opatření. Při manipulaci s činidly používejte ochranné brýle, laboratorní pláště a jednorázové rukavice. Zabraňte kontaktu těchto materiálů s pokožkou, očima nebo sliznicemi. Pokud však ke kontaktu dojde, okamžitě omyjte postižené místo velkým množstvím vody.

Pokud dojde k vylištění těchto činidel, ihned zředěte vodou a osušte jednorázovými utěrkami.

Likvidace by měla být v souladu s platnou legislativou.

Prohlášení k bezpečnostnímu listu (Material Safety Data Sheets - MSDS) je možno stáhnout na www.bag-healthcare.com.

VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM POUŽITÝM NA ETIKETÁCH					
	Diagnostikum pro použití in vitro		Použitelné do		Číslo šarže
	Teplota skladování		Katalogové číslo		Sledujte návod k použití
	Mastermix pro amplifikaci lokusu HLA-A				
	Mastermix pro amplifikaci lokusu HLA-B				
	Mastermix pro amplifikaci lokusu HLA-C				
	Mastermix pro amplifikaci lokusu HLA-DRB1				
	Mastermix pro amplifikaci lokusů HLA-DRB3/4/5				
	Mastermix pro amplifikaci lokusů HLA-DQB1 a DQA1				
	Mastermix pro amplifikaci lokusu HLA-DPB1				
	Mastermix pro amplifikaci lokusů HLA-DPA1 a DPB1				
	Mastermix pro amplifikaci specifických lokusů HLA-DQ				
	Roztok chloridu hořečnatého				

Verze: 7/2017

Změny oproti verzi 6/2014 jsou značeny žlutě

Vydáno: 2017-08

BAG Health Care GmbH

Amtsgerichtsstraße 1-5
35423 Lich/Germany

Tel.: +49 (0) 6404 / 925-0
Fax: +49 (0) 6404 / 925-250

www.bag-healthcare.com
info@bag-healthcare.com

Auftragsannahme/Ordering:

Tel.: +49 (0) 6404 / 925-450
Fax: +49 (0) 6404 / 925-460
verkauf@bag-healthcare.com

Customer Service:

Tel.: +49 (0) 6404 / 925-125
Fax: +49 (0) 6404 / 925-421
service@bag-healthcare.com