

Informazione: istruzioni d'uso

Reagenti di HISTO SPOT[®] Reagent Kit

Kit per test di tipizzazione HLA



- REF 726091: HISTO SPOT[®] Substrato** (per HISTO SPOT[®] Reagent Kit, REF 726098)
REF 726092: HISTO SPOT[®] Tampone d'ibridazione (per HISTO SPOT[®] Reagent Kit, REF 726098)
REF 726093: HISTO SPOT[®] Soluzione di lavaggio stringente (per HISTO SPOT[®] Reagent Kit, REF 726098)
REF 726094: HISTO SPOT[®] Soluzione di lavaggio TBS (per HISTO SPOT[®] Reagent Kit, REF 726098)
REF 726201: HISTO SPOT[®] Tampone di bloccaggio (per HISTO SPOT[®] Reagent Kit, REF 726098)
REF 726202: HISTO SPOT[®] Coniugato (per HISTO SPOT[®] Reagent Kit, REF 726098)

- SUBS** 36 ml substrato BCIP[®] / NBT, pronto per l'uso
(5-Bromo-4-Cloro-3-Indolilfosfato / Nitroblu Tetrazoliodoruro)
- HYBBUF** 40 ml Tampone d'ibridazione, pronto per l'uso, contiene 0,001% colorante, 0,1% sodio dodecilsolfato, 0,001% Proclin[®] 150
- STRGWASH** 100 ml Soluzione di lavaggio stringente, pronto per l'uso, contiene 0,001% colorante, 0,1% sodio dodecilsolfato, 0,001% Proclin[®] 150
- TBSWASH** 100 ml Soluzione di lavaggio TBS (Tris Buffered Saline), pronto per l'uso, contiene 20 mM Tris, 0,003% colorante, 0,001% Proclin[®] 150
- BLOCKBUF** 80 ml Tampone di bloccaggio, pronto per l'uso, contiene 0,001% Proclin[®] 150
- CONJ** 40 µl Coniugato, Streptavidina e fosfatasi alcalina, concentrato, contiene sodio azide < 0,1% (Diluizione: 1:1666 in tampone di bloccaggio)

I reagenti vanno utilizzati solo con i kit HISTO SPOT[®] Reagent. E' necessario osservare quanto indicato nelle Istruzioni d'uso dei kit HISTO SPOT[®] SSO.

Le istruzioni per l'uso sono contenute in ogni HISTO SPOT[®] Reagent kit e possono essere scaricate dal sito <http://www.bag-healthcare.com/en/Diagnostika/Downloads/>

CONSERVAZIONE

I reagenti devono essere conservati a 2...8°C. La data di scadenza indicata sull'etichetta è valida per il prodotto integro e sigillato. I reagenti aperti devono essere utilizzati entro 3 mesi.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

HISTO SPOT[®] è stato ideato per uso diagnostico in vitro e dovrebbe essere utilizzato solo da personale adeguatamente istruito e qualificato. Il tampone di bloccaggio, il tampone d'ibridazione, la soluzione di lavaggio stringente e la soluzione di lavaggio TBS contiene 0,001% Proclin[®] 150. Evitare il contatto con la pelle e le membrane mucose. Il coniugato contiene sodio azide < 0,1%, che non è considerata dannosa. Tuttavia, si consiglia di evitare il contatto con la pelle e le membrane mucose: il sodio azide può reagire con le tubature di piombo o rame e formare metalli esplosivi. Quando si eliminano le soluzioni con sodio azide attraverso gli scarichi del laboratorio, far scorrere una quantità cospicua di acqua in modo da evitare la reazione suddetta. Maneggiare i reagenti richiede delle opportune precauzioni: indossare una protezione per gli occhi, camice da laboratorio e guanti consumabili. Evitare il contatto di questi materiali con la pelle, gli occhi o le membrane mucose. In caso di contatto, lavare immediatamente con acqua abbondante. Nel caso di fuoriuscite accidentali di reagenti, diluire prima con acqua e quindi pulire l'area contaminata. Evitare il contatto tra substrato e metalli o materiali ossidanti. Smaltire reagenti non utilizzati e gli scarti secondo le legislazioni comunitarie, nazionali e locali. Le schede di sicurezza (MSDS) possono essere scaricate dal sito www.bag-healthcare.com.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI SULLE ETICHETTE

	Per uso diagnostico in vitro		Utilizzare entro
	Temperatura di stoccaggio		Numero di catalogo
	N° lotto		Consultare le istruzioni per l'uso
	Substrato		Tampone d'ibridazione
	Soluzione di lavaggio stringente		Soluzione di lavaggio TBS
	Tampone di bloccaggio		Coniugato

Versione: 4/2013

Data di rilascio: 2013-11

BAG Health Care GmbH
 Amtsgerichtsstraße 1-5 Tel.: +49 (0) 6404/925-0 www.bag-healthcare.com
 35423 Lich/Germany Fax: +49 (0) 6404/925-250 info@bag-healthcare.com

Auftragsannahme/Ordering:
 Tel.: +49 (0) 6404/925-450
 Fax: +49 (0) 6404/925-460
 verkauf@bag-healthcare.com

Customer Service:
 Tel.: +49 (0) 6404/925-125
 Fax: +49 (0) 6404/925-421
 service@bag-healthcare.com