

BAG-AutoCheck II Indikatorbögen

Indikatorbogen für den täglichen Bowie-Dick-Test

BAG-AutoCheck II, bleifrei

Best.-Nr. 7560

Verkaufseinheit: 100 Testbögen A4

Verwendungszweck

Indikatorbogen für die Durchführung des täglichen Dampfdurchdringungstestes zur Funktionskontrolle in Vorvakuum-Dampfsterilisatoren. Die Prüfung ist entsprechend DIN EN 285 im Normprüfpaket Wäsche durchzuführen.

Durchführung

1. BAG-AutoCheck-Testbogen in die Mitte eines Wäschepaketes nach DIN EN 285 oder in ein alternatives Bowie-Dick-Test System einlegen, z.B. BAG-Spezial-Testmaterial (Best.-Nr. 7461) und BAG-BD-Druckhalter (Best.-Nr. 7460).
2. Bowie-Dick-Test System (Indikatorbogen im Testpaket und BAG-BD-Druckhalter) mittig auf den Boden der leeren Sterilisierkammer stellen. Wird der BAG-AutoCheck II-Testbogen in ein Norm-Prüfpaket nach DIN EN 285 eingelegt, so ist dieses auf einer Höhe von 100-200 mm über dem Kammerboden zu positionieren.
3. Testzyklus starten (Programm: 3,5 Minuten Haltezeit bei 134°C).
4. Testpaket der Kammer entnehmen und Ergebnisse auf dem Indikatorbogen vermerken.
5. BAG-AutoCheck zur Dokumentation aufbewahren.

Beurteilung BAG-AutoCheck II:

Testbedingungen erfüllt:

Vollständige Verfärbung der Indikatorfarbe von **blau** nach **schwarz**. Keine unzulässige Restluft vorhanden, Dampfdurchdringung erfolgte gleichmäßig. Der Sterilisator ist funktionstauglich.

Testbedingungen nicht erfüllt:

Kein vollständiger Farbumschlag der Indikatorfarbe von blau nach schwarz.

Durch Restluft im Zentrum des Testpaketes keine komplette Verfärbung nach schwarz. Leuchtend blaue Aufhellung im Zentrum des Testbogens. Kein kompletter Farbumschlag durch nicht ausreichende Zeit- bzw. Temperatureinwirkung oder unzureichende Dampfeinwirkung. Überprüfung der Testbedingungen und Wiederholung des Bowie-Dick-Testes.

Lagerung: Trocken, bei Raumtemperatur

Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum

01/11