

BAG-AutoCheck-Kit II/ AutoCheck-Kit

Mehrfach verwendbares System für den täglichen Bowie-Dick-Test,
nach DIN EN ISO 11140-4

BAG-AutoCheck-Kit II

Best.-Nr. 7561

Inhalt für 30 Tests

30 BAG-AutoCheck-Kit II-
Testbögen, DIN A6, **bleifrei**,
2 Testpakete, 15 x verwendbar

BAG-AutoCheck-Kit

Best.-Nr. 7521

Inhalt für 30 Tests

30 BAG-AutoCheck-Kit-
Testbögen, DIN A6,
2 Testpakete, 15 x verwendbar



Verwendung mit BAG-CCS Druckhalter Best.-Nr. 74651

Verwendungszweck

Alternatives Bowie-Dick-Testsystem zur Durchführung des Luftentfernungs- und Dampfdurchdringungstestes bei 134°C in Dampfsterilisatoren mit fraktioniertem Vakuum Indikator Typ 2 nach DIN EN ISO 11140-1.

Anwendung

1. BAG-AutoCheck-Kit Indikatorbogen zwischen weiße und grüne Papierlagen des BAG-AutoCheck-Kit Testpaketes einlegen. Auf dem Deckblatt des Paketes Datum vermerken.
2. Spannverschlüsse der Aufnahmevorrichtung BAG-CCS Druckhalter öffnen und vorbereitetes Papier-Testpaket einlegen.
3. Spannverschlüsse des BAG-CCS Druckhalters wieder verschließen.
4. BAG-Bowie-Dick-Testsystem mittig auf den Boden der leeren Sterilisierkammer stellen (horizontale Lage der Papierschichten).
5. Bowie-Dick-Zyklus starten (Programm: 3,5 Minuten Haltezeit bei 134°C).
6. Nach Beendigung des Zyklus Druckhalter der Sterilisierkammer entnehmen.
Vorsicht: Druckhalter kann noch heiß sein (ggf. Handschuhe tragen)!
7. Die beiden Spannverschlüsse des Druckhalters öffnen und Testpaket entnehmen. Testpaket aufklappen und BAG-AutoCheck-Kit Indikatorbogen zwecks Beurteilung aus dem Testpaket herausnehmen. Testpaket bis zum nächsten Tag auslüften lassen.
8. BAG-AutoCheck-Kit Indikatorbogen auf Farbumschlag überprüfen und Testergebnisse auf dem Bogen vermerken. Indikatorbogen ggf. zur Dokumentation aufbewahren. Testpaket vor dem nächsten Gebrauch trocknen.

Beurteilung BAG-AutoCheck-Kit II / BAG-AutoCheck-Kit:

Testbedingungen erfüllt:


Vollständige Verfärbung der Indikatorfarbe von **blau** (BAG-AutoCheck-Kit II) bzw. **hellblau** (BAG-AutoCheck-Kit) nach **schwarz**. Keine unzulässige Restluft vorhanden, Dampfdurchdringung erfolgte gleichmäßig. Der Sterilisator ist funktionstauglich.

Testbedingungen nicht erfüllt:

Kein vollständiger Farbumschlag der Indikatorfarbe von blau bzw. hellblau nach schwarz. Durch Restluft im Zentrum des Testpaketes keine komplette Verfärbung nach schwarz. Leuchtend blaue bzw. braune Aufhellung im Zentrum des Testbogens. Kein kompletter Farbumschlag durch nicht ausreichende Zeit- bzw. Temperatureinwirkung oder unzureichende Dampfeinwirkung. Überprüfung der Testbedingungen und Wiederholung des Bowie-Dick-Testes.

Achtung: Trockenes Testpaket einsetzen!

Einfach

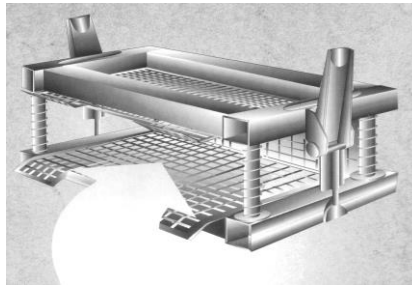

Testpaket mit Indikatorbogen einlegen. Druckhalter schließen

Ökonomisch

Best.-Nr. / Order-No. / Codice N.: 7521 / 7561

BAG-AutoCheck-Testpack

für / for / per Bowie-Dick-Test Charge / Lot No. / Lotto N.:
15 mal verwendbar / reusable 15 times / pluriuso da 15 prove

1	2	3	4	5
Date:	Date:	Date:	Date:	Date:
6	7	8	9	10
Date:	Date:	Date:	Date:	Date:
11	12	13	14	15
Date:	Date:	Date:	Date:	Date:

BAG BAG Health Care GmbH
Amtsgerichtsstraße 1-5 Tel.: +49 (0) 6404 / 925 - 0 www.bag-healthcare.com
35423 Lich / Germany Fax: +49 (0) 6404 / 925 - 250 info@bag-healthcare.com

15 x verwendbares Testpaket.

Zuverlässig



Eindeutig ablesbarer Testbefund.

Lagerung: Trocken, bei Raumtemperatur (10-38°C)

Autocheck-kit II_01_deu