

BAG-BD-Check II / BAG-BD-Check

Gebrauchsfertiges Einmal-Testpaket für den täglichen Bowie-Dick-Test, nach DIN EN ISO 11140-4

BAG-BD-Check II, bleifrei

Best.-Nr. 7563

Verkaufseinheit: 30

BAG-BD-Check

Best.-Nr. 7523

Verkaufseinheit: 30



Verwendungszweck

Alternatives Bowie-Dick-Testsystem zur Durchführung des täglichen Luftentfernungs- und Dampfdurchdringungstestes bei 134°C in Dampfsterilisatoren mit fraktioniertem Vakuum Einmaltest, Format: DIN A6. Indikator Typ 2 nach DIN EN ISO 11140-1.

Anwendung

1. Bowie-Dick-Testpaket in die leere Sterilisierkammer legen.
2. Bowie-Dick-Zyklus starten (Programm: 3,5 Minuten Haltezeit bei 134°C).
3. Nach Beendigung des Bowie-Dick-Zyklus Testpaket der Sterilisierkammer entnehmen, öffnen und Indikatorbogen auf Farbumschlag prüfen. Testergebnisse auf dem Bogen vermerken und ggf. Indikatorbogen zur Dokumentation aufbewahren.

Beurteilung BAG-BD-Check II / BD-Check:

Testbedingungen erfüllt:

Vollständige Verfärbung der Indikatorfarbe von **blau** (BAG-BD-Check II) bzw. **hellblau** (BAG-BD-Check) nach **schwarz**. Keine unzulässige Restluft vorhanden, Dampfdurchdringung erfolgte gleichmäßig. Der Sterilisator ist funktionstauglich.

Testbedingungen nicht erfüllt:

Kein vollständiger Farbumschlag der Indikatorfarbe von blau bzw. hellblau nach schwarz.

Durch Restluft im Zentrum des Testpaketes keine komplette Verfärbung nach schwarz. Leuchtend blaue bzw. braune Aufhellung im Zentrum des Testbogens. Kein kompletter Farbumschlag durch nicht ausreichende Zeit- bzw. Temperatureinwirkung oder unzureichende Dampfeinwirkung. Überprüfung der Testbedingungen und Wiederholung des Bowie-Dick-Testes.

Lagerung: Trocken, bei Raumtemperatur (10-38°C)

BD-Check_01_deu