


BAG-TwinTube

2 in 1 – Testsystem:

Bowie-Dick Test & Chargenkontrolle in **einem** Prüfkörper mit einfacher Handhabung

- zuverlässig -
- wartungsfrei -
- normkonform -

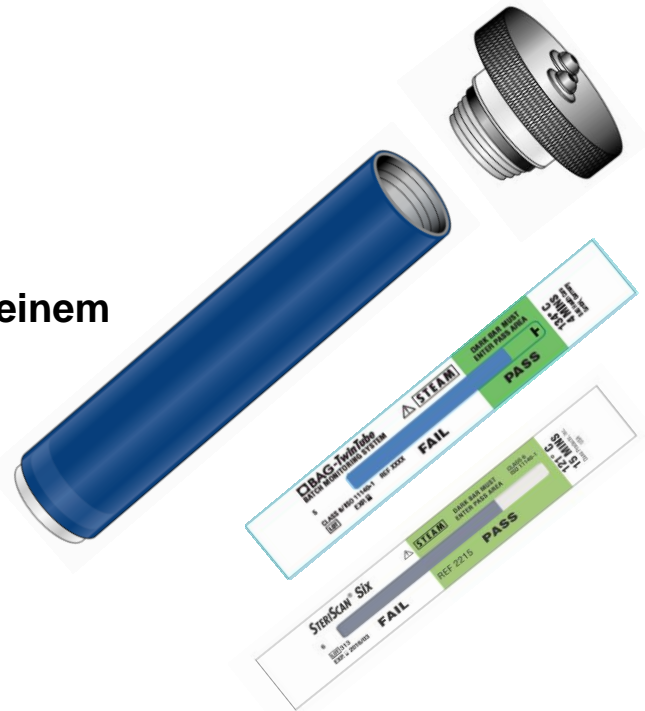

Produktvorteile:

- ✓ Nur ein Prüfkörper mit verschiedenen Indikatoren für Bowie-Dick-Test (134°C / 3,5 Min.) und Chargenkontrolle (121°C, 15 Min oder 134°C, 5 Min.)
- ✓ Einfache und schnelle Handhabung – keine Indikatorfaltung nötig
- ✓ Eindeutige Auswertung des Indikators durch Erreichen eines Zielfeldes (PASS)
- ✓ Bowie-Dick-Test entsprechend der Norm DIN EN ISO 11140-4 (Indikator Typ 2)
- ✓ Erfüllt als Chargenkontrolle die Anforderungen an ein Fehlerwarnsystem hinsichtlich Detektion von unzureichender Sterilisationszeit oder Temperatur sowie mangelhafter Entlüftung, Simulationstest für die Sterilisation von Hohlkörpern
- ✓ Verwendung hochwertiger Indikatorchemie Typ 6 für die Chargenkontrolle
- ✓ Prüfkörper auch für Bioindikatoren (Sporenstreifen, BAG-BioCheck-Ampullen) geeignet
- ✓ Wartungsfreier Vollmetall-Prüfkörper



Anwendung:

1. BAG-TwinTube Prüfkörper aufschrauben und passenden Indikator einlegen (SteriScan®-Bowie-Dick-Test-Strip bzw. SteriScan® Six 121°C oder BAG-TwinTube 134°C)
2. Prüfkörper in den Sterilisator legen und Sterilisationszyklus durchführen
3. BAG-TwinTube Prüfkörper aufschrauben und Indikator entnehmen (*Metallhülse kann noch heiß sein!*)
4. Indikator prüfen, ob die Indikatorfarbe das Zielfeld ("PASS") erreicht hat
5. Die Testergebnisse dokumentieren

Beurteilung SteriScan® BD-Test-Strip (Bowie-Dick-Test):

a. Sterilisationsbedingungen erfüllt =



Das Indikatorfenster ist **komplett** mit Indikatorfarbe gefüllt (blau bis grauschwarz).

b. Sterilisationsbedingungen **nicht** erfüllt =



Das Indikatorfenster ist **NICHT** komplett mit Indikatorfarbe gefüllt.

Beurteilung SteriScan® Six 121° C (134°C BAG TwinTube Indikator erfolgt analog):

a. Sterilisationsbedingungen erfüllt =



Die Indikatorfarbe hat das **PASS-Zielfenster erreicht** (blau bis grauschwarz, das PASS-Feld muss nicht vollständig aus gefüllt sein).

b. Sterilisationsbedingungen **nicht** erfüllt =



Die Indikatorfarbe hat das Zielfenster (PASS) **NICHT** erreicht.

Produktangebot:

	Best.-Nr.	Verkaufseinheit
BAG-TwinTube Prüfkörper	7580	1 Prüfkörper
SteriScan® BD-Test-Streifen Indikatoren für den Bowie-Dick-Test	7581	100 Indikatoren
BAG TwinTube 134°C Indikatoren für die Chargenkontrolle bei 134°C	7582	250 Indikatoren
SteriScan® Six-Indikator 121°C Indikatoren für die Chargenkontrolle bei 121°C	7583	250 Indikatoren

Lagerung: Trocken, bei Raumtemperatur

TT_FLyer_01_deu