

BAG-BlackCheck C

Chemischer Indikator zur Überwachung der Dampfsterilisation bei allen Temperaturen – laminiert



Best.-Nr. 7514
Verkaufseinheit 250

Verwendungszweck

Die einzelnen verwendbaren Papierstreifen sind bei allen gängigen Dampfsterilisationszyklen einsetzbar und zur direkten Kontrolle der zu sterilisierenden Materialien. Die Oberflächen der Indikatorstreifen sind beschichtet, um den Transfer von Indikatorfarbe auf das Sterilisiergut zu vermeiden.

Indikator Typ 4 gemäß DIN EN ISO 11140-1, gegen Sporen getestet

Anwendung

1. **BAG-BlackCheck C** in den Sterilisiercontainer einlegen
2. Sterilisationszyklus durchführen
3. BAG-BlackCheck C vor Anwendung der sterilisierten Materialien auf Farbumschlag überprüfen.
4. Testergebnisse dokumentieren

Beurteilung BAG-BlackCheck C:

- a. Sterilisationsbedingungen erfüllt =



Vollständiger Farbumschlag des „✓“ von **hellgelb** nach **schwarz**.

- b. Sterilisationsbedingungen **nicht** erfüllt =



Kein vollständiger Farbumschlag und/oder nur leichte Farbänderung nach beige oder hellbraun, Überprüfung der Sterilisationsbedingungen.

Hinweis: Eine leichte Blasenbildung des Laminats ist besonders bei sehr langen und feuchten Sterilisierzyklen nicht auszuschließen. Die Intensität des Vakuums kann ebenfalls diese Reaktion verursachen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Beurteilung des Indikators, sofern ein Farbumschlag nach schwarz sichtbar ist.

Lagerung: Trocken in der Originalverpackung
Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum

blackcheck01_deu