

# Cross-Checks EO

Chemischer Indikator zur Überwachung der Ethylenoxid-Gassterilisation

Best.-Nr. 7530  
Verkaufseinheit 250



## Verwendungszweck

**Cross-Checks EO** erfordern alle für die Ethylenoxid-Gassterilisation notwendigen Parameter – Temperatur, Zeit, Gaskonzentration, relative Luftfeuchte – um einen vollständigen Farbumschlag zu zeigen.

Indikator Typ 4 gemäß DIN EN ISO 11140-1, gegen Sporen getestet

## Anwendung

1. **Cross-Checks EO** in die Klarsichtverpackung bzw. in das zu sterilisierende Paket einlegen
2. Sterilisationszyklus wie gewohnt durchführen
3. Cross-Checks EO nach Beendigung des Sterilisierzyklus auf Farbänderung überprüfen.
4. Testergebnisse dokumentieren

## Beurteilung Cross-Checks EO:

- a. Sterilisationsbedingungen erfüllt:



Vollständiger Farbumschlag der Indikatorfelder von **gelb** nach **braun**.

- b. Sterilisationsbedingungen nicht erfüllt:



**Kein** vollständiger Farbumschlag und / oder nur leichte Farbänderung nach braun. Bei nicht vollständigem Farbumschlag des Indikators von gelb nach braun ist der Sterilisator zu überprüfen und der Test zu wiederholen. Eine Freigabe der Charge kann erst erfolgen, wenn die Farbreaktion als vollständig bewertet werden kann.

**Lagerung:** Trocken, bei Raumtemperatur

EO02\_deu