

Cross-Checks F für Formaldehyd

Chemischer Indikator zur Überwachung der Sterilisation mit Niedertemperatur-Dampf und Formaldehyd

Best.-Nr. 7533
Verkaufseinheit 250



Verwendungszweck

Cross-Checks F ist geeignet zur Verwendung in Sterilisatoren mit Niedertemperatur-Dampf und Formaldehyd, die vor der Sterilisations- bzw. Einwirkungsphase mit einem Formaldehyd-Dampfgemisch die Luft mittels mehrerer Vorvakuumzyklen aus der Sterilisierkammer und dem Sterilisiergut entfernen. Bei den Zyklen wird die Verdampfung einer wässrigen Lösung mit Formaldehyd (1-2%) und eine Sterilisations- bzw. Einwirkzeit von mindestens 60 bis 90 Minuten zugrunde gelegt. Indikator Typ 1 gemäß DIN EN ISO 11140-1.

Anwendung

1. **Cross-Checks F** werden in jedes Sterilisiererset bzw. in jede Klarsichtsterilisierverpackung für die Formaldehydgas-Sterilisation eingelegt.
2. Beurteilung der Farbänderung der Indikatoren nach Öffnen der Container direkt vor Verwendung des Sterilgutes.

Beurteilung Cross-Checks F:

a. Sterilisationsbedingungen erfüllt =



Vollständiger Farbumschlag des Indikators von **rot-violett** nach **grün**.

b. Sterilisationsbedingungen **nicht** erfüllt =



Kein vollständiger Farbumschlag des Indikators von rot-violett nach grün, Überprüfung der Sterilisationsbedingungen.

Lagerung: Trocken, bei Raumtemperatur

Haltbarkeit: 18 Monate ab Herstellungsdatum

F01_deu