

# HydroCheck-E

Test auf Wasserrückstände im Endoskopkanal



HydroCheck-E 1,7  
HydroCheck-E 2,8  
HydroCheck-E 3,8  
HydroCheck-E 5,0

Best.-Nr.: 82881  
Best.-Nr.: 82882  
Best.-Nr.: 82883  
Best.-Nr.: 82885

Inhalt: 6 Einmaltests  
Inhalt: 6 Einmaltests  
Inhalt: 6 Einmaltests  
Inhalt: 6 Einmaltests

- **Trocknungsnachweis von Endoskopkanälen**
- **Benutzerfreundlicher Fertigtest**
- **Farbumschlag zu Violett weist Wasserreste nach**
- **Nachweisgrenze von 0,05 µl Wasser**
- **Sofortiges Ergebnis**
- **In verschiedenen Swab Durchmessern erhältlich (Ø 1,7 mm , 2,8 mm , 3,8 mm und 5,0 mm)**

**Funktion:** HydroCheck-E weist bereits sehr geringe Mengen Wasser im Endoskopkanal nach. Endoskope müssen völlig trocken gelagert werden!

**Anwendung:** Vorhandenes Wasser wird durch einen einfachen Test mit einem absorbierenden Prüfstäbchen und einer Farbreaktion nachgewiesen

**Auswertung:** Ein violetter Fleck auf dem Prüfstäbchen zeigt vorhandenes Wasser an. Eine große Menge Wasser kann den ganzen Test verfärben.

**INFO: Wasserrückstände in Endoskopen sind ein Hygienerisiko. Feuchtigkeit führt zu Vermehrung von Mikroorganismen. Endoskope müssen völlig trocken gelagert werden!**

**Lagerung:** Bei 15°C-25°C trocken lagern

HyCh\_02\_deu