

TOSI[®]-LumCheck

Überprüfung der Reinigungswirkung in Hohlkörper- / MIC-Instrumenten bei der maschinellen Aufbereitung

TOSI[®]-LumCheck mit Testanschmutzung **Best.-Nr.:** 8303 **Inhalt:** 25 Stück

LumCheck Edelstahlprüfkörper **Best.-Nr.:** 8305 **Inhalt:** 1 Stück

Leistungsmerkmale

- TOSI[®]-LumCheck Testanschmutzung mit Korrelation zu Humanblut gemäß **ISO 15883**
- LumCheck Prüfkörper simuliert Hohlkörper-/MIC-Instrumente
- LumCheck Prüfkörper mit Luer-Lock-Anschluss
- LumCheck Prüfkörper innen und außen elektropoliert; glatte Oberflächen

Anwendung

- ✓ LumCheck Prüfkörper aufschrauben
- ✓ TOSI[®]-LumCheck Schutzfolie an der perforierten Linie aufreißen und Edelstahlplättchen entnehmen, ohne die Testanschmutzung zu berühren
- ✓ LumCheck Prüfkörper im Waschautomaten an wasserführende Schläuche anschließen und in Halterung einstecken. Automaten wie gewohnt beladen und Programm starten
- ✓ Nach Programmablauf LumCheck Prüfkörper aus dem Automaten entnehmen, aufschrauben und TOSI[®]-LumCheck beurteilen
- ✓ Optimale Reinigung von TOSI[®]-LumCheck:
Keine Ablagerungen
- ✓ Keine ausreichende Reinigung von TOSI[®]-LumCheck:
Fibrin und/oder Blutreste auf dem Edelstahlplättchen sichtbar



Lagerung: Bei 2 - 25°C in verschlossener Schutzfolie

Haltbarkeit: 18 Monate ab Herstellungsdatum

Lumcheck_01_deu