

# TOSI<sup>®</sup>-FlexiCheck

Überprüfung der Reinigungswirkung in Waschdesinfektionsautomaten mit Einzelkanalanschluss für flexible Endoskope

TOSI<sup>®</sup>-FlexiCheck mit Testanschmutzung **Best.-Nr.:** 8298 **Inhalt:** 5 x 5 Stück

FlexiCheck Edelstahlprüfkörper mit Silikonschlauch (Länge: 1 m) **Best.-Nr.:** 8299 **Inhalt:** 1 Stück


FlexiCheck Edelstahlprüfkörper mit verstärktem blauen Silikonschlauch (z.B. für BHT-Maschinen, Länge: 1 m) **Best.-Nr.:** 82991 **Inhalt:** 1 Stück

## Leistungsmerkmale

- TOSI<sup>®</sup>-FlexiCheck kombiniert **zwei verschiedene Testanschmutzungen** auf einem Teststreifen um die Entfernung von Blut und Polysacchariden zu überprüfen
- Abnehmbare Vorrichtung für eine visuelle Überprüfung
- FlexiCheck Prüfkörper simuliert einen Endoskopkanal

## Anwendung

- ✓ FlexiCheck Prüfkörper aufschrauben
- ✓ TOSI<sup>®</sup>-FlexiCheck Schutzfolie an der perforierten Linie aufreißen und Edelstahlplättchen entnehmen ohne die Testanschmutzung zu berühren
- ✓ FlexiCheck Prüfkörper im Waschautomaten an einen Kanal anschließen. Automaten wie gewohnt beladen und Programm starten
- ✓ Nach Programmablauf Prüfkörper aus dem Automaten entnehmen, aufschrauben und TOSI<sup>®</sup>-FlexiCheck beurteilen
- ✓ Optimale Reinigung von TOSI<sup>®</sup>-FlexiCheck: Keine Ablagerungen
- ✓ Keine ausreichende Reinigung von TOSI<sup>®</sup>-FlexiCheck: Fibrin und/oder Blutreste und/oder Polysaccharid auf dem Edelstahlplättchen sichtbar

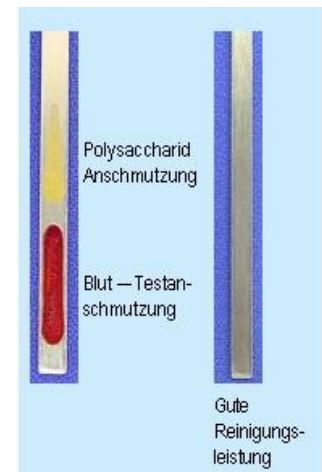

**Lagerung:** Bei 2 - 25°C in verschlossener Schutzfolie

**Haltbarkeit:** 18 Monate ab Herstellungsdatum

01/11