

TOSI[®] Test Object Surgical Instruments

Gebrauchsfertiger Reinigungsindikator zur Validierung und Routineüberwachung der Reinigungswirkung von Waschdesinfektionsautomaten

Best.-Nr.: 8302 **Inhalt:** 12 Tests


Leistungsmerkmale

- Praxisnahes Reinigungsverhalten
- Testanschmutzung mit Korrelation zu Humanblut gemäß **ISO 15883**
- Differenzierte Fehleranalyse für jede Spülphase
- Spalt simuliert Gelenke chirurgischer Instrumente
- Clips sichern die einfache Befestigung in Siebschalen
- Transparente Abdeckung ermöglicht visuelle Bewertung




Anwendung

- ✓ TOSI[®] Schutzverpackung unmittelbar vor Gebrauch öffnen und TOSI[®] flach auf der Siebschale einklicken
- ✓ Überprüfung der Reinigungsleistung im Routinebetrieb: TOSI[®] werden zusammen mit chirurgischen Instrumenten aufbereitet
- ✓ Nach Programmablauf Reinigungsindikatoren aus dem Automaten entnehmen und TOSI[®] beurteilen

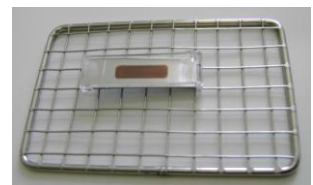

Auswertung

- ✓ Optimale Reinigung von TOSI[®]: Keine Ablagerungen
- ✓ Keine ausreichende Reinigung von TOSI[®]: Fibrin und/oder Blutreste auf dem Edelstahlplättchen

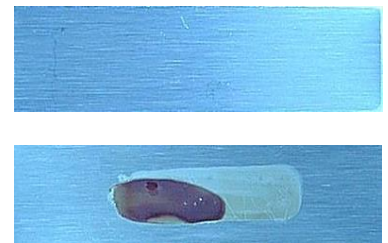

Lagerung: Bei 2 - 25° C in verschlossener Schutzfolie, außer Reichweite von Desinfektionsmitteln u. Chemikaliendämpfen lagern

Haltbarkeit: 18 Monate ab Herstellungsdatum

TOSI_01_deu