

# Staubschutzhüllen, selbstklebend

Staubschutzhüllen in verschiedenen Größen für die sichere Langzeitlagerung



## Verwendungszweck

Staubschutzhüllen (Dustcover) – eine Sekundärverpackung für einen sicheren Transport und gleichzeitig für eine sichere Lagerung von verpackten Medizinprodukten. Eine Umverpackung, die die eigentliche Primärverpackung vor externer Verschmutzung schützt und damit die Lagerzeiten maßgeblich auf bis zu fünf Jahren verlängert. Eine **nicht** wieder verschließbare, selbstklebende PE-Verpackung zum Schutz vor Manipulation.

## Anwendung

1. Sterilgut in Primär- und/oder Sekundärverpackung in Staubschutzhülle (Lagerverpackung) einbringen.
2. Zum Verschließen der Staubschutzhülle Schutzfilm des Klebestreifens entfernen. Staubschutzhülle durch Andrücken des Klebestreifens verschließen (Markierung beachten).
3. Lagerverpackung kennzeichnen (Lagerzeit / Verfalldatum) und lagern.
4. Vor Gebrauch der verpackten Materialien Verfalldatum prüfen und Staubschutzhülle ordnungsgemäß von Staub befreien.
5. Staubschutzhülle an der markierten Stelle in Pfeilrichtung durch langsames gleichmäßiges Ziehen öffnen und Sterilgut entnehmen.
6. Sterilgut kann der Verwendung zugeführt werden.

**Lagerung:** Trocken, bei Raumtemperatur

**Haltbarkeit:** 5 Jahre

Staubschutzhüllen, selbstklebend, sind in sechs unterschiedlichen Größen erhältlich:

<b>Bestell- Nummer</b>	<b>Größe</b>	<b>Verkaufs- einheit (VE)</b>
<b>8217</b>	<b>152 x 254 mm</b> 6 x 10 inch	<b>1000</b>
<b>8218</b>	<b>203 x 304 mm</b> 8 x 12 inch	<b>1000</b>
<b>8219</b>	<b>254 x 381 mm</b> 10 x 15 inch	<b>1000</b>
<b>8220</b>	<b>305 x 508 mm</b> 12 x 20 inch	<b>500</b>
<b>8221</b>	<b>406 x 558 mm</b> 16 x 22 inch	<b>500</b>
<b>8223</b>	<b>609 x 762 mm</b> 24 x 30 inch	<b>250</b>

05/07