

SonoCheck

Dokumentation



Gebrauchsfertiger Test zur Überprüfung der
Ultraschallenergie bei der Aufbereitung von
chirurgischen Instrumenten

SonoCheck Reinigungskontrollanleitung für Ultraschallbäder


Funktionstest

Der Funktionstest überprüft die Verteilung der Ultraschallenergie im Becken. Erst nach vollständiger Überprüfung der Funktion kann durch den Routinetest Sicherheit in der Praxis erhalten werden.


Zusätzlich kann durch den Funktionstest der Prozess optimiert werden, dabei hilft der SonoCheck Troubleshooting Guide.

Der Funktionstest wird ohne Beladung durchgeführt.


Bei der Validierung des Reinigungsprozesses in Ultraschallbecken mit SonoCheck wird eine Prüfung (analog zur Verwendung von z.B. TOSI®) unter Standardbedingungen (mit Beladung) durchgeführt:

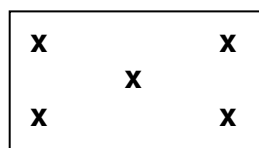

klein (≤ 5 l)

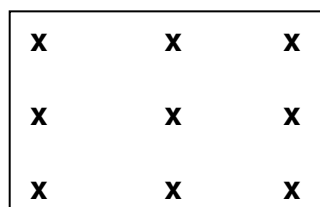

mittel (5 – 20 l)

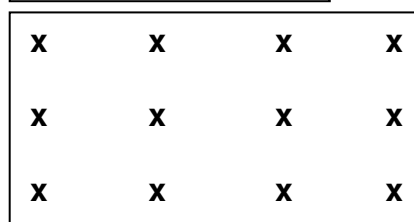

groß (≥ 20 l)


Routinetest (Testergebnis muss positiv sein!)

Der Routinetest überprüft die Ultraschalleistung unter Praxisbedingungen (mit Beladung). Veränderliche Parameter (Füllhöhe, Entgasung, Beladung oder Leistung der Schallgeber) können das Ultraschallbad beeinflussen. Um eine mangelhafte Aufbereitung zu vermeiden, können durch den Routinetest Fehler rechtzeitig erkannt werden.


Der Routinetest wird, wie in den Abbildungen, mit Instrumentenbeladung durchgeführt. SonoCheck wird dabei zwischen die Instrumente platziert. Zusätzlich können mögliche Schwachpunkte separat geprüft werden.



klein (≤ 5 l)

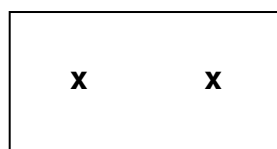

mittel (5 – 20 l)

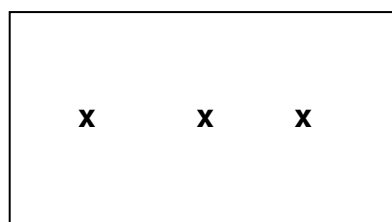

groß (≥ 20 l)

Qualitätssicherung

Beim Beladen des Ultraschallbades keine Instrumente in Schallschatten und keine kritischen Instrumente an Schwachpunkten platzieren.

Um ein positives (+) Ergebnis zu erhalten müssen alle SonoCheck während Routine- und Funktionstest umgeschlagen sein.

Im Falle von unbefriedigenden (-) Ergebnissen hilft der SonoCheck Troubleshooting Guide.



BAG Health Care GmbH
Amtsgerichtsstraße 1-5
35423 Lich/Germany

Tel.: +49 (0) 6404 / 925 - 0
Fax: +49 (0) 6404 / 925 - 250

www.bag-healthcare.com
info@bag-healthcare.com

Auftragsannahme/Ordering:

Tel.: +49 (0) 6404 / 925 - 450
Fax: +49 (0) 6404 / 925 - 460
verkauf@bag-healthcare.com

Customer Service:

Tel.: +49 (0) 6404 / 925 - 125
Fax: +49 (0) 6404 / 925 - 421
service@bag-healthcare.com