

Gen / Gene	Ergebnis Result	Spezifität/Specificity	Allele / alleles	1	2	3	4	5	6
HLA-C1	<input type="checkbox"/>	HLA-C Asn ⁸⁰	C*01:02:01-13,15-01:58,60,62-78 / *02:12,27:01,27:02 / *03:02:01-06,08-11:02,13,14,16-44,46-129,131-139,141-162,164-195 / *04:11,29,36,55 / *06:11 / *07:01:01:01-06,08,10-33N,35-48,50-75,77-209,211-237,239-246,248-294,296-314 / *08:01:01-09,11-63,65-78 / *12:02:01-03:25,06-08,10:01-20,22-32,34-40,42Q-53,55-59,61-99 / *14:02:01-03,05-11,13-48,50-52 / *15:07,21,25,43 / *16:01:01-01:13,04:01,06-08,10-11,13-18,20-24,26-45,49-56,58-59	1					
HLA-C2	<input type="checkbox"/>	HLA-C Lys ⁸⁰	C*01:14 / *02:02:01-02:11,02:13-11,13-26:03,28-40,42-64,66-68 / *03:07,15,45,163 / *04:01:01:01-01-28,01:30-01:52,03:01-10,12-20,23-28,30-35,37-54,56-113,115N-152 / *05:01:01:01-01:27,03-19,21-31,33-94 / *06:02:01:01-02:01:02,02:03-02:11,02:13-10,12-51,53:01-81,83-102 / *07:07,09,76,315 / *08:10 / *12:04:01-05,09,21,33,41,60 / *14:12,49 / *15:02:01-06:03,08-13,15-19,22-24,26-42,44-59,61-70 / *16:02:01-02:09,09,12,19,25,46-48 / *17:01:01:01-19 / *18:01-07N (sometimes weak unspecific at about 80bp)		2				
HLA-B	<input type="checkbox"/>	HLA-B Bw4 ^{Threo}	B*07:149 / *08:02 / *13:01:01-04,06-08,10-12:01,13-23,25-38,40-66,68,70 / *15:36,89,115,256/18:09/27:01 / *37:10 / *38:02:01-04,08,15,18,23,29,35,43 / *40:47,96,110,157,201 / *44:02:01:01-05:04,07-08,10,12-17,19N-24,26-45,47-49,51-74,76-89,91-94,96-128,130,132-151,153-181 / *47:04 / *49:02 / *51:54,78:01-78:02 / *52:20 / *53:09,11-13,31 / *56:07 (sometimes weak)			3			
HLA-B	<input type="checkbox"/>	HLA-B Bw4 ^{Iso}	B*07:36,38,81,180 / *08:03,52,78 / *15:13:01-13:02,16:01-17:02,23-24:02,67,87,95,157,162,168,177,196,208,216,222,230,254,268,273 / *18:67/27:02:01-02:02,30,53,57,62,65N,75,77,83,95,102 / *37:34 / *38:01:01-01:07,05-07,09-14,16,19-22,24-28,30-34N,36-42 / *40:13,19,109,117 / *44:06,18,25,50,95 / *48:18 / *49:01:01-01:04,03-26 / *51:01:01-01:07,01:09-01:39,01:41-24:04,26-46,48-49,51-53,55-77,79-154 / *52:01:01-01-19,21-31 / *53:01:01-02,04-08:02,10,14-30 / *54:12 / *56:21 / *57:01:01-11,13-65 / *58:01:01-02,04-29,31N-46 / *59:01:01-01-06				4		
HLA-A	<input type="checkbox"/>	HLA-A Bw4	A*01:95 / *02:81,87,112,124,129,136 / *03:152 / *23:01:01-60 / *24:02:01:01-03:02,05-11N,13:01-15,17-18,20-25,27,29-43,45N-64,24:66-88,90N-99,100w-108,110-128,130-210,212-240N,242-246 / *25:01:01-23 / *29:13 / *31:07-08,10 / *32:01:03-01:15,03-04,06-16,18,20-58 / *68:36					5	
	<input type="checkbox"/> !	Negativ Kontrolle Negative control							6
		Länge/Length in bp		326	323	356	356	392	
Reaktionsmuster / Reaction pattern				1	2	3	4	5	6

Version: V1.4

07/2013

Proben-ID: / Sample-ID:

Probenname: / Name:

Geb.-Datum: / born:

Ergebnis: / Result:

Datum: / Date:

Unterschrift: / Signature:

Gelbild / Gel Picture

- ! Wenn die Negativ Kontrolle eine positive Reaktion zeigt, muß der Test wiederholt werden /
If the negativ controll shows a positive reaction, the test must be repeated.
- * Mix 3 zeigt manchmal eine schwächere spezifische Reaktion als die anderen Mixe /
Mix 3 shows sometimes a weaker specific reaction than the other mixes

Bemerkungen / Remarks

BAG Health Care GmbH
Amtsgerichtsstraße 1-5
35423 Lich/Germany

Tel.: +49 (0) 6404/925-0
Fax: +49 (0) 6404/925-250
www.bag-healthcare.com
info@bag-healthcare.com

Auftragsannahme/Ordering:
Tel.: +49 (0) 6404/925-450
Fax: +49 (0) 6404/925-460
verkauf@bag-healthcare.com

Customer Service:
Tel.: +49 (0) 6404/925-125
Fax: +49 (0) 6404/925-421
service@bag-healthcare.com