

KIR TYPE

07/2013

LOT

REF 7105

Auswertediagramm / Evaluation diagram

KIR genes	Ergebnis Result	Spezifitäten/Specificities	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<input type="checkbox"/> !	Negativ-Kontrolle <i>Negative control</i>	1																					
2DL1	<input type="checkbox"/>	*001-01202,*014-025		2																				
2DL2	<input type="checkbox"/>	*0010101-008,*010			3																			
2DL3	<input type="checkbox"/>	*0010101-009,*011-016				4																		
2DL4	<input type="checkbox"/>	*00101-00105w,*00201-022					5																	
2DL5A	<input type="checkbox"/>	*001,*005,*012,*014,*015						6	7															
2DL5B	<input type="checkbox"/>	*002-004,*006-011,*01301-01303,*016						6		8														
2DS1	<input type="checkbox"/>	*001-006,*008									9													
2DS2	<input type="checkbox"/>	*0010101-008										10												
2DS3	<input type="checkbox"/>	*00101-005											11											
2DS4	<input type="checkbox"/>	*0010101-00104,*011,*014,*015												12										
2DS4	<input type="checkbox"/>	*003-007,*009,*010,*012,*013												12	13									
2DS4	<input type="checkbox"/>	*008													13									
2DS5	<input type="checkbox"/>	*001-011														14								
3DL1	<input type="checkbox"/>	*00101-044,*051-053,*056,*057,*059-061,*064-068,*072,*073															15							
3DL2	<input type="checkbox"/>	*0010101-042N,*043-062																16						
3DL3	<input type="checkbox"/>	*00101-023,*025-036,*041-055																		17				
3DS1	<input type="checkbox"/>	*010-014,*045-050,*055,*058																			18			
2DP1	<input type="checkbox"/>	*00101-010																				19		
3DP1	<input type="checkbox"/>	*001-004,*007,*009																					20	
3DP1*003	<input type="checkbox"/>	*003,*005,*006,*008,*010																					20	21
	<input type="checkbox"/>	Positiv-Kontrolle (Chro 1) <i>positive control (Chro 1)</i>																						22
		Länge/Length in bp		142	142	135	252	163	1640	1640	143	204	212	99	171	108	136	180	191	147	168	157	233	659
Reaktionsmuster / Reaction pattern			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

W = schwach positiv / weak positive

Version: 2.0

04/2011

Proben-ID: / Sample-ID:

Probenname: / Name:

Geb.-Datum: / born:

Ergebnis: / Result:

Datum: / Date:

Unterschrift: / Signature:

Gelbild / Gel Picture



BAG Health Care GmbH
 Amtsgerichtsstraße 1-5
 35423 Lich/Germany

Tel.: +49 (0) 6404/925-0
 Fax: +49 (0) 6404/925-250

www.bag-healthcare.com
 info@bag-healthcare.com

Auftragsannahme/Ordering:
 Tel.: +49 (0) 6404/925-450
 Fax: +49 (0) 6404/925-460
 verkauf@bag-healthcare.com

Customer Service:
 Tel.: +49 (0) 6404/925-125
 Fax: +49 (0) 6404/925-421
 service@bag-healthcare.com

KIR TYPE

i 07/2013

LOT

REF 7105

Mix #	Größe/Size [bp]	Spezifität / Specificity	Allele / Alleles
1			Negativ-Kontrolle / negative control
2	142	KIR2DL1	*001-01202,*014-025
3	142	KIR2DL2	*0010101-008,*010
4	135	KIR2DL3	*0010101-009,*011-016 (sometimes weak / manchmal schwach)
5	252	KIR2DL4	*00101-00105w,*00201-022
6	163	KIR2DL5	A*0010101-00105,*0050101-0050104,*01201,*01202,*014,*015 B*0020101-004,*00601-011,*01301-01303,*016
7	1640	KIR2DL5	A*0010101-00105,*0050101-0050104,*01201,*01202,*014,*015
8	1640	KIR2DL5	B*0020101-004,*00601-011,*01301-01303,*016
9	143	KIR2DS1	*001-006,*008
10	204	KIR2DS2	*0010101-0010112,*00102-00104,*002-008
11	212	KIR2DS3	*00101-00106,*0020101-0020103,*003N-005
12	99	KIR2DS4	*0010101-0010109,*00102-00104,*0030101-0030104, *0040101,*0040102,*0060101,*0060102,*007,*009-015
13	171	KIR2DS4	*0030101-010,*012,*013
14	108	KIR2DS5	*001-011
15	136	KIR3DL1	*0010101-023,*024N,*025-044,*051-053, *056,*057,*059-061,*064-068,*072,*073
16	180	KIR3DL2	*0010101-042N,*043-062
17	191	KIR3DL3	*00101-023,*025-036,*041-055
18	147	KIR3DS1	*010-014,*045-049N,*50,*055,*058
19	168	KIR2DP1	*00101-0010203,*0020101-0020109,*0030101-010
20	157	KIR3DP1	*001-005w,*006w,*007-010 (manchmal unspezifisch / sometimes unspecific)
21	233	KIR3DP1*003	*0030101-0030402,*005,*006,*008,*010
22	659		Positiv-Kontrolle / positive control

04/2011

! Wenn die Negativ Kontrolle eine positive Reaktion zeigt, muß der Test wiederholt werden /
If the negativ controll shows a positive reaction, the test must be repeated.

Bemerkungen / Remarks



BAG Health Care GmbH
Amtsgerichtsstraße 1-5
35423 Lich/Germany

Tel.: +49 (0) 6404/925-0
Fax: +49 (0) 6404/925-250
www.bag-healthcare.com
info@bag-healthcare.com

Auftragsannahme/Ordering:
Tel.: +49 (0) 6404/925-450
Fax: +49 (0) 6404/925-460
verkauf@bag-healthcare.com

Customer Service:
Tel.: +49 (0) 6404/925-125
Fax: +49 (0) 6404/925-421
service@bag-healthcare.com