

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

# ZEČJI KOMPLEMENT



## ZA PRIMENU U IN VITRO DIJAGNOSTICI

REF 7018, 7023

### Opis proizvoda

**Zečji komplement** se proizvodi iz velikog pula zečjeg seruma, kako bi se obezbedila skoro identična aktivnost komplementa različitih lotova.

Zečji komplement se koristi na primer u testu mikrolimfotoksičnosti, prilikom detekcije HLA antigena na membrani limfocita.

### Primena

Rastvorite liofilizirani komplement sa 1 ml ili 5 ml destilovane vode (prema veličini pakovanja). Za rekonstituisanje je potrebno 10-15 minuta.

Rekonstituisan komplement mora da se čuva na hladnom (2...8°C) i iskoristi u toku 3 - 4 sata.

**NEMOJTE ZAMRZAVATI rastvoren zečji komplement!**

### Upozorenja i mere predostrožnosti

**Zečji komplement** je dizajniran isključivo za primenu u in vitro dijagnostici i treba da ga koristi adekvatno obučeno osoblje.

U svakom slučaju sav biološki materijal treba smatrati potencijalno infektivnim, jer ni jedan metod testiranja ne može garantovati da je materijal poreklom iz biološkog izvora lišen infektivnih agenasa. Prilikom rukovanja biološkim materijalom preporučuju se mere predostrožnosti (nemojte pipetirati ustima; koristite rukavice za jednokratnu upotrebu dok radite sa biološkim materijalom i tokom izvođenja testa; nakon završetka testa dezinfikujte ruke).

Biološki materijal treba inaktivirati pre uklanjanja (npr. u autoklavu). Potrošni materijal za jednokratnu upotrebu nakon korišćenja treba autoklavirati ili spaliti. Prosut potencijalno infektivan materijal treba odmah ukloniti papirnom vatom i obrisati kontaminiranu površinu sredstvom za dezinfekciju ili 70% alkoholom. Materijal korišćen za brisanje prosutog sadržaja, uključujući i rukavice, treba pre uklanjanja inaktivirati (npr. u autoklavu). Svi uzorci i materijal za testiranje treba da se uklanjaju u skladu sa državnim i lokalnim propisima.











Kada se koristi u skladu sa principima Dobre Laboratorijske Prakse, dobrim higijenskim standardima i prema instrukcijama datim u ovom uputstvu, dati reagens ne bi trebalo da predstavlja rizik po zdravlje.

Nemojte koristiti **zečji komplement** nakon isteka roka trajanja naznačenog na nalepnici.

**Rok trajanja:** liofiliziran do isteka roka trajanja navedenog na nalepnici, rastvoren videti uputstvo

**Čuvanje:** liofiliziran 2...8°C ili ≤ -20°C, rastvoren videti uputstvo

**Pakovanje:** videti informaciju naznačenu na nalepnici

Objašnjenja simbola korišćenih na nalepnici			
	Koristiti do		Pogledati uputstvo za upotrebu
	Čuvati na temperaturi		Za primenu u in vitro dijagnostici
	Zečji komplement		Broj šarže
	Namenjeno primeni: HLA-tipizacija		Kataloški broj
	lioilizirano		ili

Za uputstva za upotrebu na drugim jezicima <http://www.bag-healthcare.com> ili telefon +49 (0)6404-925-125

Verzija: 1/2014 / Izdanje: 2014-03

Distributer za Srbiju: Yunycom d.o.o.: Tel.: 011/3606-987 / Fax: 011/3606-988 / [office@yunycom.rs](mailto:office@yunycom.rs)