



BAG-GreenCard – Auswerteschema



Unbehandelter Indikator

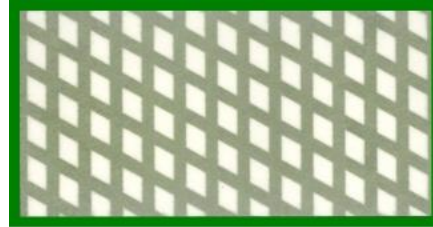


PASS
Vollständiger Farbumschlag nach grün

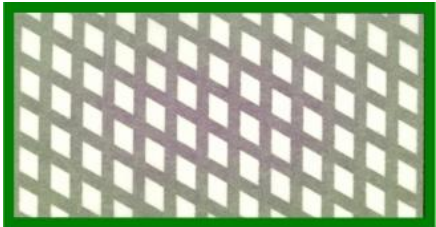


FAIL
Mangelhafte Luftentfernung
bzw. Dampfdurchdringung




PASS
Bräunliche Verfärbung, lange Trocknungszeit

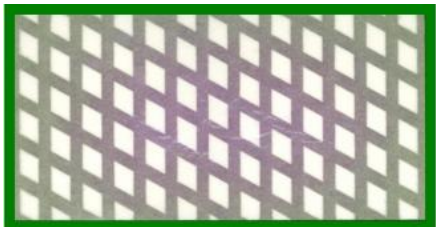

FAIL
Mangelhafte Luftentfernung
bzw. Dampfdurchdringung

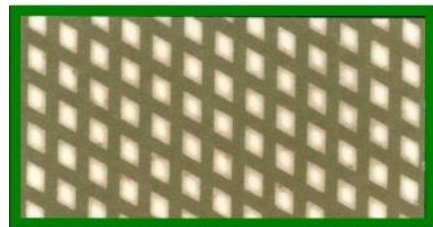

PASS
Bräunliche Verfärbung, lange Trocknungszeit

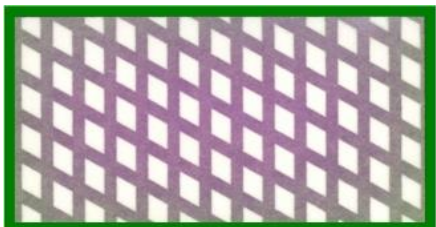

FAIL
Mangelhafte Luftentfernung
bzw. Dampfdurchdringung



PASS
Wassertropfen auf Indikator, Schirm verwenden
oder Karte anders herum in Halter einsetzen