

BAG-GreenCard T

Gebrauchsfertiges Testpaket für den täglichen Bowie-Dick-Test,
für Dampf-Kleinsterilisatoren, DIN EN 867-5

Best.-Nr. 7575

Verkaufseinheit: 15



Verwendungszweck

Einmal-Testpaket zur Durchführung des täglichen Luftentfernungs- und Dampfdurchdringungstestes bei 134°C in Dampf-Kleinsterilisatoren mit fraktioniertem Vorvakuum (**Typ B nach EN 13060**). Entspricht den Vorgaben der DIN EN 867-5. Indikator Typ 2 nach DIN EN ISO 11140-1.

Anwendung*

1. **BAG-GreenCard T** in die leere Sterilisierkammer legen.
2. Bowie-Dick-Zyklus starten (Programm: 3,5 Minuten Haltezeit bei 134° C).
3. Nach Beendigung **BAG-GreenCard T** der Sterilisierkammer entnehmen, der Verpackung entnehmen auf Farbumschlag prüfen. Testergebnisse auf der Rückseite bzw. im Sterilisationstagebuch dokumentieren. Ggf. Indikatorbogen zur Dokumentation aufbewahren.

*Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung

Beurteilung BAG-GreenCard T:

Testbedingungen erfüllt:

Gleichmäßige Verfärbung der Indikatorfarbe von **rot-violett** nach **grün**.
Keine unzulässige Restluft vorhanden, Dampfdurchdringung erfolgte gleichmäßig.
Der Sterilisator ist funktionstauglich.

Testbedingungen nicht erfüllt:

Kein vollständiger Farbumschlag der Indikatorfarbe von rot-violett nach grün.
Durch Restluft im Zentrum des Testpaketes keine komplette Verfärbung nach grün.
Purpurne Aufhellung im Zentrum des Indikators. Überprüfung der Testbedingungen und Wiederholung des Bowie-Dick-Testes.

Lagerung: Trocken in Originalverpackung, bei Raumtemperatur

GreenCardT_01_deu