

BAG-ChemoStrip

Mehr-Stufen-Indikator zur Überwachung der Dampfsterilisation

	Best.-Nr.	Verkaufseinheit
BAG-ChemoStrip 121°C	7501	250
BAG-ChemoStrip 134°C	7502	250
BAG-ChemoStrip 18	7529	250



einfach – sicher – individuell

Verwendungszweck


- Für fraktioniertes Vakuum bei 121°C, 134°C, sowie 134°C/18 Min. („Prionenzyklus“)
- Integriert die Parameter Dampf, Temperatur und Zeit
- Patientenbezogene Überwachung des Sterilgutes
- Abschließende Prüfung durch das OP-Personal
- Lückenlose patientenorientierte Dokumentation
- Indikator Typ 6 (i6) gemäß DIN EN ISO 11140-1

Anwendung

1. **BAG-ChemoStrip** in Wäsche- oder Instrumentencontainer einlegen
2. Entsprechenden Sterilisationszyklus durchführen
3. Beurteilung der Farbänderung der Indikatoren nach Öffnen der Container direkt vor Verwendung des Sterilgutes
4. Dokumentation der Ergebnisse

Beurteilung BAG-ChemoStrip 121°C, 134°C, 134°C/18 Min.:

a. Sterilisationsbedingungen erfüllt = Vollständiger Farbumschlag der Zahlen „121“, „134“ bzw. „18“ von **rot-violett** nach **grün**

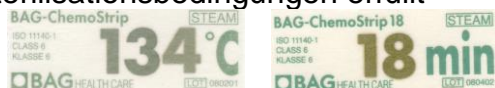

b. Sterilisationsbedingungen nicht erfüllt = **Kein** vollständiger Farbumschlag der Zahlen „121“, „134“ bzw. „18“ von rot-violett nach grün, Überprüfung Sterilisationsbedingungen der



Lagerung: Trocken, bei Raumtemperatur
Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum

ChemStr_01_deu