

# SEALabel®

**Versiegeln und Etikettieren in einem Schritt -  
Container einfach kontrollieren und kennzeichnen**



## Ihre Vorteile im Überblick:

- Patentiertes Containersiegel zum schnellen Versiegeln und Etikettieren von Sterilgutcontainern
- Aufkleben von Etiketten verschiedener Größen möglich (horizontale und vertikale Maße)
- Etikettenlabel kann hochgeklappt und am Siegel befestigt werden, für gute Sichtbarkeit an jedem Container
- Optimales Auslesen von Barcodeetiketten
- Innenseite kann für zusätzliche Etiketten verwendet werden (z.B. für die Dokumentation fehlender Instrumente)
- Die Etikettenhalterungen können leicht entfernt, eingescannt und archiviert werden



## So einfach überwachen Sie den Kreislauf Ihrer Sterilgutcontainer:

Vorderseite: **SEALabel®**



- + Siegel-Vorderseite mit großer Fläche zum Anbringen von Etiketten
- + Versiegelungsstatus sofort sichtbar

Rückseite: **monoSEAL®**



- + Verschluss für Rückseite inkl. Indikator Klasse 1
- + Farbumschlag signalisiert sterilisierten Zustand des Containers

## Gebrauchsanweisung:

Die Container-Vorderseite mit **SEALabel**<sup>®</sup> versiegeln:

1. SEALabel an der Container-Vorderseite anbringen und das Siegel schließen
2. Großes Siegelement hochklappen bis es einrastet und das Etikett aufkleben

Die Container-Rückseite mit **monoSEAL**<sup>®</sup> versiegeln:

1. monoSEAL-Verschluss schließen.

Der Container ist nun bereit für die Sterilisation. Auf jedem monoSEAL ist ein Indikator Klasse 1 aufgebracht, dessen Farbumschlag von weiß nach braun/schwarzbraun den Zustand des Containers nach der Sterilisation aufzeigt.

## Verpackungseinheiten:

**Paket I: 500 Stück SEALabel<sup>®</sup> + 500 Stück monoSEAL<sup>®</sup>**

| Artikel   | SEALabel<br>blau  | SEALabel<br>rot   | SEALabel<br>grün  | SEALabel<br>gelb   | SEALabel<br>violett   | SEALabel<br>weiss   |
|-----------|---|---|---|--|---|---|
|           |  |  |  |  |  |  |
| Best.-Nr. | 82301   | 82302   | 82303   | 82304  | 82305   | 82306   |

**Paket II: 1.000 Stück monoSEAL<sup>®</sup>**

| Artikel   | monoSEAL<br>blau  | monoSEAL<br>rot   | monoSEAL<br>grün  | monoSEAL<br>gelb   | monoSEAL<br>violett   | monoSEAL<br>weiss   |
|-----------|---|---|---|--|---|---|
|           |  |  |  |  |  |  |
| Best.-Nr. | 82321   | 82322   | 82323   | 82324  | 82325   | 82326   |