

Dry Checks

Indikatorstreifen für die Heißluftsterilisation

Best.-Nr.
75171

Verkaufseinheit
250



BAG-DryCheck

Indikator-Klebeetiketten für die Heißluftsterilisation

Best.-Nr.
7513

Verkaufseinheit
1.000



Verwendungszweck

Dry Checks Indikatorstreifen und **BAG-DryCheck** Indikatoretiketten dienen der Unterscheidung von sterilisierten und nicht sterilisierten Materialien bei der Heißluftsterilisation. Durch Einwirken von trockener Hitze in einem Temperaturbereich zwischen 160 bis 180°C erfolgt ein Farbumschlag der Indikatorfelder von grün nach schwarz.

Anwendung

1. Sterilisiergüter entsprechend Standard-Vorschriften gründlich reinigen.
2. Indikatoren mit den zu sterilisierenden Materialien in den Heißluft-Sterilisator einbringen (Streifen) bzw. aufkleben (Etiketten) und den Sterilisationsprozess starten
3. Bei Exposition im Heißluft-Sterilisator verändert sich die Indikatorfarbe auf den Indikatoren von grün nach schwarz
4. Nach Beendigung des Sterilisationsprozesses Farbreaktion der Indikatoren beurteilen

Beurteilung DryChecks / BAG-DryCheck Etiketten

a. Sterilisationsbedingungen erfüllt =



Vollständiger Farbumschlag des Indikatorfeldes von **grün** nach **schwarz**.

b. Sterilisationsbedingungen **nicht** erfüllt =



Kein vollständiger Farbumschlag des Indikatorfeldes von grün nach schwarz, Überprüfung der Sterilisationsbedingungen

Lagerung: Trocken, bei Raumtemperatur

Haltbarkeit: 3 Jahre (DryChecks) / 5 Jahre (BAG-DryCheck Etiketten) ab Herstellungsdatum

01/11